

Kleintier



# Compact Rhinoskop/Vaginoskop

Klassische endoskopische Grundausrüstung für die Heim- und Kleintierpraxis



# WIRELESS Compact Rhinoskop/Vaginoskop

Eines der Kleinsten weltweit  
mit Arbeitskanal

15 2025

+49 (0)7777 / 882300 ■ dr.fritz@dr-fritz.de ■ www.dr-fritz.com

**Dr. Fritz**<sup>®</sup>  
Wireless Endoscopes



# Compact Rhinoskop/Vaginoskop

Klassische endoskopische Grundausrüstung für die Heim- und Kleintierpraxis



- ✓ Akku austauschbar
- ✓ integr. 5,8 GHz Videosender
- ✓ unabhängig von Videoturm & Lichtquelle
- ✓ einfach und schnell in der Anwendung & Aufbereitung



## Das Set (TA20-3SET)

Die schnurlose Generation mit Wechselakku, eingebauten LED's & Videokamera.

- Compact Rhinoskop/ Vaginoskop
- 2 x Wechsel- Akku
- Biopsiezange & Katheter
- Reinigungsbürste
- Drei-Wege-Hahn
- Ladeschale
- Schutz-/Spülschaft 4mm  
NEU: Ermöglicht Zirkulationsspülung
- 10" Empfänger-Monitor inkl. Rekorder

## Erweiterbare Anwendungsbereiche

siehe Seite 13

### Schnurlose Videoübertragung





# Compact Rhinoskop/Vaginoskop

## Das Set

Compact Rhinoskop/Vaginoskop

D: 3,4x2,6mm, 8,5 Charr

NL: 20cm

Arbeitskanal: 1,2mm


Luer-Anschluss, vollständig einlegbar



Netzteil  
(97-FU14EU)

Ladeschale  
(TVG-4)

Wechselakku  
(TVG-36)

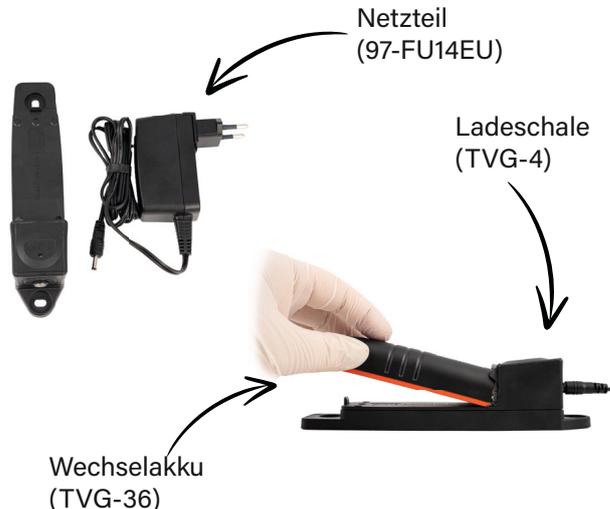

Biopsiezange

D: 1,0 mm

NL: 35cm

(B10-351)



Schutz-/Spülschaft

4mm

ermöglicht eine Umlaufspülung  
(TV20-3SP)



Reinigungsbürste  
(F20-181E/1)



3 Wege-Hahn  
(Y-LL-1273H)



Spezial-Katheter

D: 1,0 mm

NL: 100cm

(F13-102A)



10" Empfänger Monitor  
inkl. Rekorder und Akku  
(TXM10-58R)





# Zusatzausstattung


Compact Video-Rhinoskop/Vagoskop

## ■ Saug/Spülpumpe

Zur Linsenspülung,  
Insufflation und Absaugung.  
Für die Klein und Großtierpraxis

### H140-3S

- Saug/Spülpumpe (H140-3)
- 1 Li. Saugflasche (H160-AB-43)
- 1 Li. Spülflasche (H160-AB-7)
- Schläuche & Netzteil
- Ersatzfilter (AR-10-922)

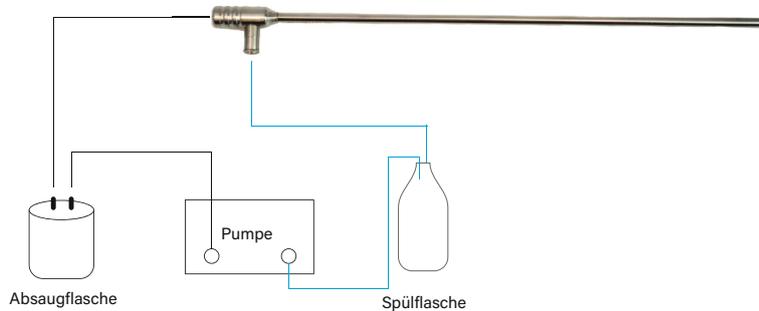

## ■ NEW! Post-Rhino-Spiegel

### TA20-3P18

D: 18mm, NL: 20cm  
Mit Gaumensegel-Haken

Die Untersuchung des Retropharynx war bisher besonders gut ausgestatteten Kliniken und Praxen vorbehalten. Durch den neuen Schaft mit integriertem Gaumensegelhaken, gelingt es auf eine einfache Art diesen Bereich per Video optimal einzusehen.





# LED-Spiegelsystem für die Postrhinoskopie


bei Hund & Katze



Das neue Spiegelsystem mit integriertem LED-Licht und einem im 70° Winkel beweglichen Spiegel, ermöglicht auf einfache Art den Retropharynx optimal einzusehen. Durch den Batterie-LED-Lichtträger ist freies Arbeiten ohne störende Kabel möglich.

Einfach in der Pflege und Reinigung, optimales Handling.

## ■ Choanen-Spiegel mit LED-Licht, unabhängig von Endoskopen

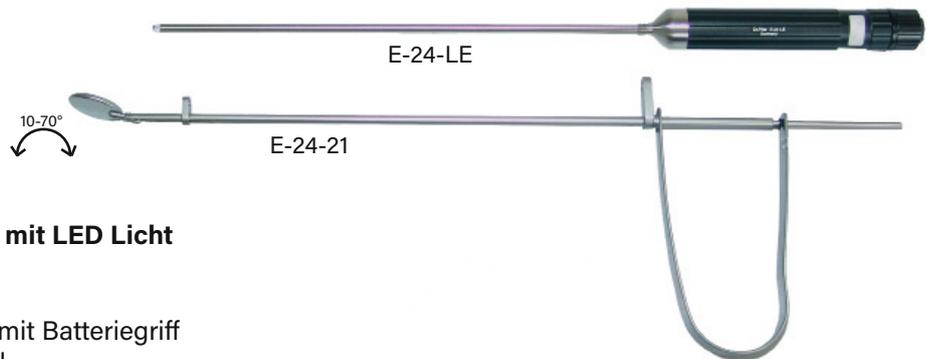

**E-24-LE-SET** Set zur Post-Rhinoskopie mit LED Licht bestehend aus:

- E-24-LE LED-Lichtträger mit Batteriegriff
- E-24-21 Choanen-Spiegel
- E-22-2 Gaumensegelhaken
- E-22-71 Antibeschlagmittel

## ■ Zubehör



**E-22-2** Gaumensegel-Doppelhaken  
16 cm, für Katzen und mittelgroße Hunde



**E-22-71** Antibeschlagmittel  
für Endoskope und Spiegelflächen, 50 ml

**K-3325-61** Transport-Kofferchen  
33x25x6 cm (o. Abb.)